

SISTEMA DE BLANQUEAMIENTO WHITE GOLD HOME



USO

Sistema de blanqueamiento altamente recomendado para el blanqueamiento de dientes vitales, contiene como ingrediente activo peróxido de carbamida.

Pacientes con dientes naturales, oscurecidos debido a la edad o pigmentaciones extrínsecas, son excelentes candidatos para procedimientos de blanqueamiento con el sistema White Gold Home.

Los mejores resultados se obtienen en pacientes que presenten dientes con coloración amarilla, anaranjada o levemente marrón. Debido a que es un gel de alta viscosidad presenta una acción continua y posee además un agradable sabor a menta.

Es recomendado para el blanqueamiento de dientes antes de la confección de restauraciones de resina compuesta, facetas laminadas, corona de porcelana pura, inlays onlays, de manera que el color de bases sea lo más próximo al color deseado al finalizar tratamiento restaurador.

ESPECIFICACIONES

- Alta Tixotropía: No se escurre, facilitando el uso del paciente.
- Concentración del 10% y 16%: Formula adaptada a la necesidad del paciente.
- Liberación de flúor: Reduce la incidencia de sensibilidad.
- Agradable sabor menta: Mejor aceptación del paciente.

COMPOSICIÓN

Peróxido de Carbamida, Espesante o Flavorizante.

PRECAUCIONES

1. Evitar el contacto del gel blanqueador con los tejidos bucales, ojos y piel. Si ocurriese contacto accidental, lavar el área afectada con abundante cantidad de agua. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante cantidad de agua y obtener asistencia medica.
2. Mantener fuera del alcance de los niños.
3. Informar al paciente sobre la posibilidad de sensibilidad dental.

CONTRAINDICACIONES

- Embarazo o periodo de Lactancia
- Pacientes alérgicos al peróxido de carbamida o a otros componentes de la formula.
- Pacientes fumadores, a menos que se abstengan de fumar durante el tratamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PRODUCTO**PRESENTACIÓN:****KIT 10% o 16%**

5 Jeringas de 3ml
1 Estuche para placas
5 Puntas Aplicadoras
2 Placas de Silicona (de 1mm)
1 Manual de Instrucciones
1 Guía de Colores

REFIL 10% o 16%

1 Jeringa de 3 ml
1 Punta Aplicadora
1 Manual de instrucciones

FECHA DE VENCIMIENTO

24 MESES

MARCA:
DENTSPLY

REGISTRO INVIMA Y/O CERTIFICACIÓN DE QUE NO LO REQUIERE

2009DM-0005123

FECHA DE VENCIMIENTO REGISTRO

24-Dic-19

ORIGEN DE FABRICACIÓN DEL BIEN

Brasil

PRESENTA CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA: SI NO

Firma Responsable Legal